



Innstilling av grenseverdier

1. Etter at forsterkingsreaksjonen er fullført, innstilles grenseverdien automatisk av instrumentet. Den innstilles ofte for lavt eller for høyt:


- For lavt:

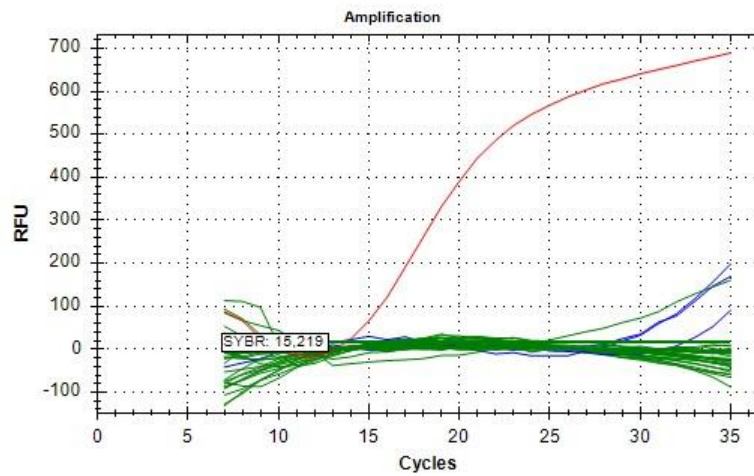

- For høyt:

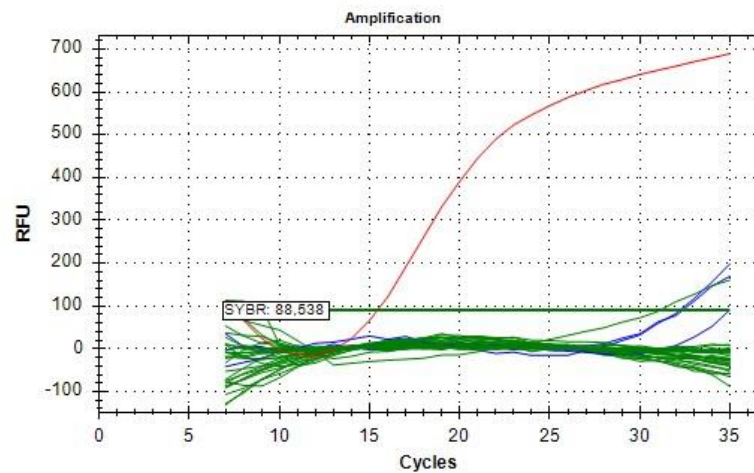

2. Hvis grenseverdien innstilles for lavt eller for høyt, bør den innstilles manuelt. Sett grenseverdien så lavt som mulig uten at bakgrunnssignalet krysser den, og samtidig som grenseverdien ligger over kurven for den negative kontrollen:

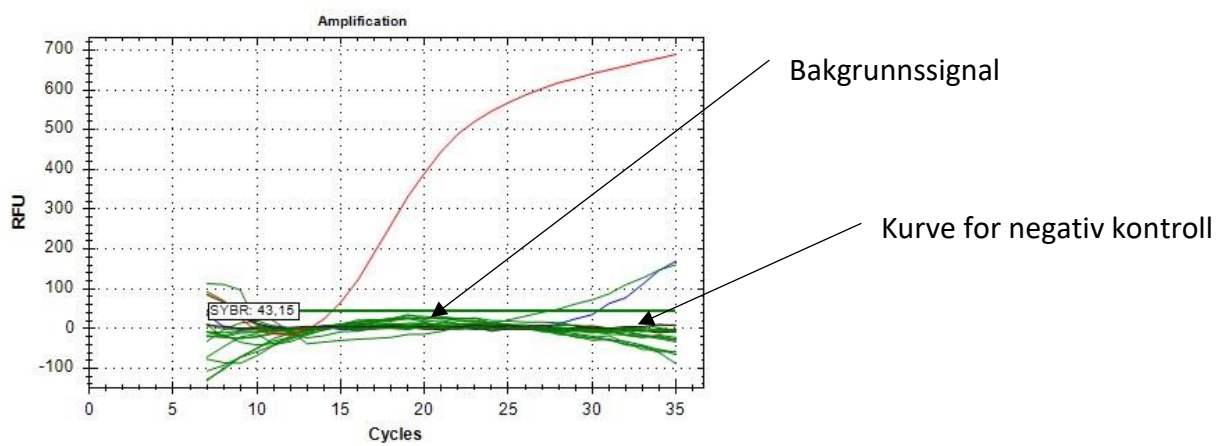

3. Etter at riktig grenseverdi er innstilt, vil det oppnås riktige Ct-resultater for hver kjøring.